

Remover Spray 50ml. per adesivi medicali

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I****Destinazione d'uso:** Consente una facile, veloce e indolore rimozione degli adesivi medicali.

Particolarmente indicato per la rimozione di:

- *Sacche per ileostomia*
- *Sacche per colostomia*
- *Sacche per urostomia*
- *Cerotti medicati, cerotti per medicazione, bendaggi per taping ecc.*

**VALVOLA INTERNA
BOV (BAG ON VALVE)****Cod. ISO 09.18.30.009**

La formulazione:

- ♦ **È priva di alcool**, per evitare bruciore sulla cute.
- ♦ **È priva di grassi**, per non lasciare residui unti favorendo così la successiva applicazione di adesivo.

Il propellente è isolato dal principio attivo:

- ♦ **nessuno shock termico** quando si spruzza il prodotto sulla cute.
- ♦ **delicato** sulla cute.

L'innovativa valvola interna **BOV (BAG ON VALVE)** di cui è dotato il flacone, consente:

- ♦ di ottenere una **distribuzione ottimale**.
- ♦ di spruzzare il prodotto da qualsiasi angolazione (360° di azione) in modo da raggiungere agevolmente qualsiasi zona del corpo.
- ♦ di consumare tutto il contenuto del flacone (50 ml) senza residui né sprechi.

Dopo l'uso non è necessario il lavaggio della zona cutanea per rimuovere il prodotto.
Si asciuga velocemente consentendo l'immediata applicazione di un nuovo adesivo medicale.



Remover Spray 50ml. per adesivi medicali

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Istruzioni per l'uso:**

Spruzzare direttamente sul bordo della compressa adesiva da rimuovere e attendere alcuni secondi.
Tirare con delicatezza per staccare la compressa adesiva dalla pelle.
Se necessario, spruzzare nuovamente per rendere più facile la completa rimozione.
Quando la soluzione è evaporata è possibile l'applicazione di una nuova compressa adesiva.

Avvertenze:

Usare solamente come sopra indicato.

Evitare il contatto con gli occhi e le orecchie. Solo per uso esterno.

In caso di dubbio, prima dell'uso effettuare una prova in una piccola zona.

Interrompere l'uso se appaiono irritazioni.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione! Recipiente pressurizzato.

Proteggere dalla luce del sole e non esporre a temperature superiori a 50°C.

Non forare o bruciare il contenitore dopo l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dispositivo altamente infiammabile.

Specifiche tecniche:**Composizione:** Miscela di Silossani. Non tossico e non citotossico.**Smaltimento:** Smaltire secondo le norme vigenti.

CODICE MINSAN	BARCODE
923555116	 A923555116

