
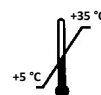


Materasso antidecubito ad aria con pompa BASIC

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

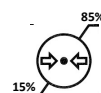

Classificazione

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

Dispositivo che ha lo scopo di prevenire e ridurre le piaghe da decubito e ottimizzare il comfort del paziente.

Caratteristiche

Sovramaterasso costituito da due serie di celle sferiche (bolle) che, gonfiandosi e sgonfiandosi alternativamente, assicurano uno scarico di pressione alternato ogni 6 minuti circa. È dotato di doppio tubo di collegamento alla pompa e di un kit di riparazione.

Avvertenze

Consultare sempre il Medico prima dell'utilizzo. Non impostare mai la massima pressione come valore iniziale. Non lasciarlo collegato alla rete elettrica quando non è in uso. Non utilizzare il materasso come appoggio durante una rianimazione cardiaca o durante misure di emergenza. Il materasso non è indicato per sostenere il peso di più persone. Utilizzare singolarmente. Evitare il contatto diretto tra la cute del paziente e il materasso: prima di ogni utilizzo coprirlo con un lenzuolo di cotone. Non stirare mai il materasso. Non utilizzare prodotti taglienti in prossimità del materasso.

CARATTERISTICHE SOVRAMATERASSO

Dimensioni (gonfio) cm.	Portata max Kg.	Materiali	Cod. ISO (riconducibile)
200 x 90 x 7	130 - 135	PVC (spessore 0,03 m)	03.33.06.018

CARATTERISTICHE COMPRESSORE

Dimensioni cm.	Peso Kg.	Alimentazione	Ciclo gonfiaggio	Uscita d'aria	Pressione esercizio mmHg
24 x 11 x 10	0.9	220-230 V AC, 50 Hz	6 min. (±1) totale: 12 min. circa per un ciclo completo.	5.5 lt/min.	Regolabile: da 20 a 120 circa

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.farmacare.it/trattamenti



Codice	Descrizione	Barcode
978832881	Materasso Antidecubito aria c/pompa Basic	 A978832881
978832893	Materasso Antidecubito Basic RICAMBIO	 A978832893