

Benda Refrigerante all'Ossido di Zinco

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Doppio effetto:
refrigerante ed
antiflogistico**



Per proteggere l'abbigliamento, sopra la Benda è opportuno avvolgere un ulteriore bendaggio o un bendaggio tubolare elastico (per esempio, FARMAGRIP).

Classificazione

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

Distorsioni, strappi muscolari, contusioni e traumi sportivi di vario genere (tendini, muscoli, articolazioni e legamenti).

Caratteristiche

Facile da applicare, non contiene alcool. Bendaggio veloce ed efficace soprattutto in caso di traumi sportivi. Poco prima dell'applicazione è possibile mettere il bendaggio in frigorifero, qualora se ne abbia la disponibilità, per aumentarne l'effetto refrigerante.

Se applicata a temperatura ambiente la Benda garantisce un effetto refrigerante fino a 4 ore. Al termine delle 4 ore, per prolungarne l'effetto, spruzzare con acqua.

L'effetto refrigerante del dispositivo dona un sollievo immediato.

Capacità di estensione: 60%.

Composizione: Benda base: viscosa e poliammide/Pasta di zinco: acqua, glicerina, ossido di zinco, polietilenglicole, carbossimetilcellulosa, sodio-alginato, fenossietanolo, etilene diammina tetra acetato, cetareth-25 e conservanti .

Confezionamento: n.1 benda avvolta singolarmente in uno speciale involucro di alluminio.

Avvertenze: Non applicare direttamente su cute lesa e/o su ferite aperte essudanti. Prima di applicare la benda alla pasta di zinco, le ferite esistenti devono essere trattate in base al loro stato e coperte con una medicazione indicata allo scopo. Non immergere la benda in acqua. Non utilizzare nel caso di ipersensibilità allo zinco o a qualsiasi altro ingrediente della composizione. Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo. Conservare lontano da fonti di calore e umidità.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

| Codice | Descrizione | Misura | Barcode |
|-----------|--|--------------|---|
| 925337471 | Benda Refrigerante all'Ossido di Zinco | 5 mt x 6 cm |  A925337471 |
| 925337444 | Benda Refrigerante all'Ossido di Zinco | 5 mt x 8 cm |  A925337444 |
| 925337469 | Benda Refrigerante all'Ossido di Zinco | 5 mt x 10 cm |  A925337469 |

