

SOCIETA' CERTIFICATA UNI CEI EN ISO 13485:2021

Via A. Gramsci, 8/10/12/14 40018 San Pietro in Casale (BO) Tel.: 051.811905 · Fax: 051.811185 www.farmacare.it - commerciale@farmacare.it

## perta isotermica oro/argento

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.











Misure: cm. 160x210.

## **DESTINAZIONE D'USO:**

COPERTA **ISOTERMICA** È UN **DISPOSITIVO** MEDICO CON LA FUNZIONE DI ISOLARE TERMICAMENTE DAL FREDDO O DAL CALDO. VIENE UTILIZZATA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI PRONTO SOCCORSO (DI USTIONATI E/O TRAUMATIZZATI, AD ESEMPIO) O PER LA PROTEZIONE DA AGENTI ATMOSFERICI, POICHÉ HA LA FUNZIONE DI ISOLARE TERMICAMENTE L'INFORTUNATO IN FUNZIONE DEL LATO ESTERNO.

CARATTERISTICHE: Se la coperta è posizionata con il lato argento a contatto con il corpo ed il lato oro esterno conserva circa l'85% del calore corporeo (protezione dal freddo), mentre se è posizionata con il lato dorato a contatto con il corpo ed il lato argento esterno riflette i raggi solari permettendo al corpo di rimanere fresco (protezione dal caldo).

ISTRUZIONI PER L'USO: Stendere la coperta sul corpo, lasciando scoperto il volto, senza stringere. Posizionare il lato oro esternamente per trattenere il calore (protezione dal freddo) oppure posizionare il lato argento esternamente per riflettere i raggi solari (protezione dal caldo). Il Dispositivo è monouso.

SCOPO:	POSIZIONAMENTO SUL CORPO:		
Protezione dal freddo	Lato oro della coperta posizionato esternamente, lato argento a contatto con il corpo		
Protezione dal caldo	Lato argento della coperta posizionato esternamente, lato oro a contatto con il corpo		

AVVERTENZE: Il dispositivo non è sterile. Utilizzare solo a contatto con cute integra. Utilizzare solo per la destinazione d'uso indicata. Non riutilizzare il dispositivo.

MATERIALE: Il prodotto è costituito da PET alluminizzato (foglio di polietilene alluminizzato).

CONFEZIONE: La coperta isotermica è contenuta, ripiegata, in un sacchetto di polietilene trasparente con chiusura minigrip. Ogni confezione contiene istruzioni per l'uso in cinque lingue e illustrazioni esplicative su possibili utilizzi.

**SMALTIMENTO:** Smaltire dopo l'uso secondo le normative vigenti.

CODICE MINSAN	BARCODE	DIMENSIONI	<b>CND</b> (Classificazione Nazionale Dispositivi)	RDM
909411581	A909411581	cm. 160 x 210	T030399 - COPERTURE DI RISCALDAMENTO – ALTRE	2222121