

Borsa per Acqua Calda Plus

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

BS Standard 1970:2012

Classificazione: Dispositivo Medico Classe I.

Destinazione d'uso: Dispositivo riutilizzabile per il trattamento sintomatico di dolore di varia natura come mal di testa, emicrania, dolori muscolari, contratture, crampi e dolore mestruale, grazie al rilascio progressivo di calore.

Caratteristiche: colore blu. Capacità di 2 lt. Notevole elasticità ed elevata capacità di mantenimento del calore. Chiusura con tappo a vite e superficie bilamellare per un rilascio graduale del calore. Realizzato con lo standard BS (British Standard).

Composizione: Borsa: Gomma naturale. Contiene lattice. Tappo: PA e PP.

Pulizia e manutenzione: dopo l'uso svuotare la borsa da ogni residuo d'acqua e lasciare asciugare l'interno completamente prima di richiudere con il tappo per evitare la formazione di muffe. La parte esterna può essere lavata a mano, non utilizzare spugne abrasive e detergenti aggressivi. Conservare il dispositivo a temperatura ambiente.

Avvertenze:

- Controllare l'integrità del dispositivo prima dell'uso: non utilizzare se risulta danneggiato.
- Non riempire oltre i $\frac{3}{4}$ della capacità totale, per evitare rischi di rottura o scoppio.
- Non riempire con acqua bollente o eccessivamente calda.
- Versare l'acqua calda all'interno della borsa usando preferibilmente un imbuto.
- Non mettere la borsa piena d'acqua nel forno o nel microonde, ed evitare il contatto con superfici calde o incandescenti (termosifoni, grill, fornelli ecc.).
- Non collocare la borsa dell'acqua calda a contatto diretto con la cute, ma avvolgerla sempre con un panno di cotone o spugna.
- Non collocare la borsa dell'acqua calda a contatto diretto con cute lesa.
- In nessun caso sedersi sulla borsa piena o usarla come cuscino.
- Non lasciare la borsa piena nelle mani di bambini, disabili o persone non autosufficienti: potrebbero aprire inavvertitamente il tappo e ustionarsi con acqua calda.
- Evitare il contatto del dispositivo con oggetti pungenti e taglienti.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di pregresse allergie ai materiali di composizione.

Smaltimento: smaltire secondo le normative vigenti.

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.farmacare.it/trattamenti


CND	RDM
M9001	2587794



A938982257

