

Bastone da Passeggio con Seduta

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico Classe I.

Destinazione d'uso:

Ausilio a supporto della mobilità. Serve a facilitare la deambulazione, aumentando la stabilità. Riduce inoltre l'affaticamento e il carico sugli arti inferiori, poiché consente di scaricare il peso della gamba interessata. Inoltre, grazie alla sua seduta apribile, consente all'utente di sedersi e riposare al bisogno.

Caratteristiche e materiali:

- Struttura in alluminio
- Sedile apribile in plastica
- Impugnatura in plastica con laccetto per il trasporto
- Gambe regolabili in altezza
- Altezza totale come bastone: 86-93 cm
- Altezza totale come seduta: 73-80 cm
- Altezza seduta-pavimento: 50-56 cm
- Peso netto: 1,07 kg
- Portata massima: 100 kg



Pulizia e manutenzione:

Pulire ed asciugare periodicamente. Rimuovere lo sporco con un panno morbido inumidito e sapone neutro. Asciugare successivamente. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi o abrasivi: possono danneggiare il materiale del prodotto. Inoltre, non utilizzare prodotti grassi che possono degradare i materiali o renderli scivolosi. Quando non viene utilizzato, conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente.

Avvertenze e precauzioni:

Prima dell'utilizzo, verificare sempre la stabilità del bastone.

Prima dell'utilizzo, assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano in posizione e ben serrati.

Prima dell'utilizzo, assicurarsi che i puntali siano in perfette condizioni. Se mostrano segni di usura, provvedere alla loro sostituzione.

Non utilizzare il prodotto in caso di danni visibili e di parti mancanti.

Non utilizzare il dispositivo su terreno irregolare, instabile, in presenza di crepe o ghiaccio.

Prestare attenzione quando si utilizza il bastone su tappeti, superfici bagnate, superfici scivolose (foglie, ghiaia, sabbia o neve).

Non superare mai il peso massimo supportato.

Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone con gravi problemi di equilibrio o disturbi percettivi funzionali.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

Codice	Descrizione prodotto	Barcode
950261089	Bastone da passeggio con seduta	 A950261089

