

Bastone da Passeggio Telescopico

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivo Medico Classe I.**Destinazione d'uso:**

Ausilio di sostegno per la deambulazione che il paziente utilizza quando è richiesto lo scarico di uno dei due arti inferiori, offre una maggiore stabilità e sicurezza. Indicato per pazienti nel decorso postoperatorio, con artrosi, gesso o necessità di fornire un maggiore equilibrio, sia staticamente che dinamicamente.

Caratteristiche e materiali:

- Struttura in alluminio
- Impugnatura in legno
- Regolabile in altezza
- Altezza: 63-101 cm
- Peso netto: 0,350 kg
- Diametro puntale: 21 mm
- Portata massima: 100 kg

Pulizia e manutenzione:

Pulire ed asciugare periodicamente. Rimuovere lo sporco con un panno morbido inumidito e sapone neutro. Asciugare successivamente. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi o abrasivi: possono danneggiare il materiale del prodotto. Inoltre, non utilizzare prodotti grassi che possono degradare i materiali o renderli scivolosi. Quando non viene utilizzato, conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente.

Avvertenze e precauzioni:

Prima dell'utilizzo, verificare l'integrità del prodotto. Non utilizzare il prodotto in caso di danni visibili e di parti mancanti. Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il puntale sia in perfette condizioni. Se mostra segni di usura, provvedere alla sua sostituzione. Non utilizzare il dispositivo su terreno irregolare, instabile, in presenza di crepe o ghiaccio. Prestare attenzione quando si utilizza il bastone su tappeti, superfici bagnate, superfici scivolose (foglie, ghiaia, sabbia o neve). Non superare mai il peso massimo supportato. Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone con gravi problemi di equilibrio o disturbi percettivi funzionali. Se non regolato all'altezza corretta, l'uso del dispositivo potrebbe causare danni derivati dalla postura scorretta (lesioni e contratture muscolari alla schiena, alle braccia e alle mani).

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

Codice	Descrizione prodotto	Barcode
950261077	Bastone da passeggio telescopico	 A950261077

