

Sospensorio Comfort

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.


Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I – Non sterile

Destinazione d'uso: Realizzato per assicurare maggior sostegno e protezione nella zona pelvica, senza comprimere in modo fastidioso i tessuti addominali. Consigliato soprattutto durante l'attività sportiva.

Utilizzato per la contenzione di varicocele e idrocele. Grazie alla sua facilità di utilizzo e garantendo una totale libertà di movimento è indicato per sportivi e consigliato nei decorsi post operatori.

Composizione: Cotone 41%, Poliammide 25%, Poliestere 13%, Elastan 12%, Lycra 9% (le percentuali possono variare).

Istruzioni: Scegliere la taglia corretta prima dell'utilizzo in base alla propria circonferenza della vita. Consigliato un lavaggio prima dell'utilizzo (lavaggio con un ciclo normale ad una temperatura massima di 40 °C). Indossare il sospensorio come un normale slip in modo che la borsa in cotone contenga lo scroto.

Avvertenze e Controindicazioni: Non indossare a contatto con la cute lesa oppure a contatto con pomate o unguenti. Non trattare con candeggina. Non stirare. Non asciugare in asciugatrice. Non lavare a secco. Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore. In caso di variazione di peso cambiare il sospensorio e sceglierne uno più adatto. Contiene lattice.

Smaltimento: Smaltire secondo le norme vigenti.

Disponibile in quattro diverse taglie, individuabili misurando la circonferenza vita.

CODICE MINSAN	BARCODE	DIMENSIONI	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)	REP (Numero di Repertorio)
925605976	 A925605976	S 70-80 cm.	Y090699	2204522
925605988	 A925605988	M 81-90 cm.		2204566
925605990	 A925605990	L 91-102 cm.		2204576
925606004	 A925606004	XL 103-113 cm.		2205302

