

Bastone Passeggio Pieghevole

Impugnatura Soft

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Pieghevole
in 2, 3 o 4 parti
secondo esigenza



Colore/Fantasia
può variare
secondo disponibilità



Classificazione

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

Indicato per coloro che necessitano di sostegno durante la deambulazione. Pratico per il trasporto.

Caratteristiche e Materiali

Composizione: Canna: Alluminio / Impugnatura: Silicone

Caratteristiche tecniche:

- Portata massima: 100 Kg.
- Diametro puntale: 19 mm.
- Altezza regolabile: da 84 a 94 cm.
- Peso del bastone: 0,320 Kg.

Istruzioni di utilizzo:

- Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia integro e in perfette condizioni.
- Impugnare il bastone con la mano opposta alla gamba interessata.
- Mantenere il bastone il più possibile in posizione verticale rispetto al suolo.
- Non posizionare l'estremità della canna troppo distante dal corpo.

Pulizia e manutenzione: Rimuovere lo sporco con un panno morbido inumidito e sapone neutro, quindi asciugare accuratamente. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi o abrasivi, poiché potrebbero danneggiare i materiali del prodotto. Evitare inoltre l'uso di prodotti grassi, che possono degradare i materiali o renderli scivolosi. Quando non viene utilizzato, conservare il prodotto in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.

Avvertenze: I bastoni devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato e non per altri impieghi. L'utente non deve superare la portata massima indicata sull'etichetta del prodotto. Prestare attenzione quando si utilizza il bastone su tappeti, superfici bagnate, scivolose (foglie, ghiaia, sabbia, neve). Non utilizzare su superfici ghiacciate.

Smaltimento: Smaltire secondo le Normative vigenti.

CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE
986008112	Bastone passeggio pieghevole impugnatura SOFT (Colore può variare secondo disponibilità)	 A986008112

