

Bastone canadese lega

con ammortizzatore

1 pezzo

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Portata
massima
100 kg



CON
AMMORTIZZATORE

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

Indicato per utilizzatori che presentano una significativa compromissione della mobilità, difficoltà di movimento o di equilibrio. I bastoni sono destinati a mantenere, promuovere ed assicurare la deambulazione e alleggerire (parzialmente o completamente) il carico su una delle estremità inferiori.

Descrizione e caratteristiche

Composizione: Impugnatura in TPR soft-touch, canna in alluminio.

Caratteristiche: Bastone con sistema di ammortizzazione integrata • Peso bastone 320 gr • Altezza regolabile: 85-100 cm • Portata massima 100 kg • Puntale da 19 mm.

Pulizia e manutenzione: Pulire regolarmente tutte le superfici con un panno morbido e umido e asciugare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare mai prodotti abrasivi, candeggina, detergenti, prodotti chimici o grassi che possono degradare i materiali o rendere i bastoni scivolosi. Verificare periodicamente lo stato di usura e la presenza di crepe su puntale, anello di bloccaggio e impugnatura. Conservare il dispositivo al riparo da fonti di calore e luce solare diretta.

Avvertenze: Prima dell'utilizzo, verificare l'integrità del prodotto. Non utilizzare in caso di danni visibili. Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il puntale sia in perfette condizioni. Se mostra segni di usura, provvedere alla sua sostituzione. Non utilizzare il dispositivo su terreno irregolare, instabile, in presenza di crepe o ghiaccio. Prestare attenzione quando si utilizza il bastone su tappeti, superfici bagnate, superfici scivolose (foglie, ghiaia, sabbia o neve). Non superare mai il peso massimo indicato. Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone con gravi problemi di equilibrio o disturbi percettivi funzionali. Se non regolato all'altezza corretta, l'uso del dispositivo potrebbe causare danni derivati dalla postura scorretta.

Descrizione	Codice	Barcode
BASTONE CANADESE LEGA CON AMMORTIZZATORE 1 PEZZO	952006233	 A952006233
PUNTALE ANTISCIVOLO PER BASTONE CANADESE/GRUCCIA 19 MM - 2pz	900214255	 A900214255

Dispositivo detraibile: LEA (2017) 12.03.06.003

