

Tripode in Acciaio

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

Dispositivo di supporto progettato per essere utilizzato come ausilio alla deambulazione da parte di persone con ridotta mobilità. È destinato a fornire stabilità e sostegno durante lo spostamento in ambienti interni o esterni, aiutando l'utente a mantenere l'equilibrio e ridurre il rischio di cadute.

Descrizione e caratteristiche

Tripode in tubo di acciaio cromato con impugnatura a maniglia.

Regolabile in altezza 75-103 cm

Puntali antiscivolo in gomma

Dimensione base 20 x 30 cm

Peso prodotto 1,1 kg - Peso massimo utilizzatore 150 kg

Pulizia e manutenzione: Controllare ogni 6 mesi il serraggio di eventuali viti, bulloni, rivetti. Sostituire i puntali di appoggio quando risultano usurati. Pulizia ordinaria va eseguita con acqua e detergente neutro. Pulizia straordinaria e sanificazione con getto di vapore a bassa pressione. Lavare ed asciugare subito in caso di contatto con sabbia ed acqua di mare.

Avvertenze e precauzioni:

La scelta del dispositivo spetta all'utilizzatore coadiuvato da personale medico-ortopedico.

L'altezza va regolata secondo prescrizione medico-ortopedica.

Controllare l'integrità del dispositivo prima dell'uso: non utilizzare se risulta danneggiato.

Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il dispositivo.

Durante la deambulazione procedere con cautela, un passo alla volta, facendo attenzione all'appoggio corretto ad ogni passo.

Prestare attenzione alla presenza di tappeti, fili elettrici od altri ingombri a pavimento.

Non utilizzare su terreni scivolosi, su neve e ghiaccio.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.



Codice	Descrizione	Barcode	CND
950577445	Tripode in acciaio	 A950577445	Y120315 TRIPODI

