

# Bastone Canadese per Bambini

## 2 pz.

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Altezza regolabile all'estremità inferiore: 64-78 cm**

**Portata massima 100 kg**



**Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso:	
Dispositivo di supporto alla deambulazione indicato per bambini, ragazzi e persone di corporatura minuta con deficit funzionali di uno o entrambi gli arti inferiori, derivanti da patologie osteoarticolari o neurologiche, traumi o esiti post-operatori.	
Caratteristiche e materiali:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composizione: Alluminio e PVC</li> <li>• Portata massima: 100 Kg</li> <li>• Diametro puntale: 19 mm</li> <li>• Altezza regolabile all'estremità inferiore: 64-78 cm</li> </ul>	
Pulizia e manutenzione:	
Pulire ed asciugare periodicamente. Rimuovere lo sporco con un panno morbido inumidito e sapone neutro. Asciugare successivamente. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi o abrasivi: possono danneggiare il materiale del prodotto. Inoltre, non utilizzare prodotti grassi che possono degradare i materiali o renderli scivolosi. Quando non viene utilizzato, conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente.	
Avvertenze e precauzioni:	
<p>Prima dell'utilizzo, verificare l'integrità del prodotto. Non utilizzare il prodotto in caso di danni visibili e di parti mancanti. Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il puntale sia in perfette condizioni. Se mostra segni di usura, provvedere alla sua sostituzione. Non utilizzare il dispositivo su terreno irregolare, instabile, in presenza di crepe o ghiaccio. Prestare attenzione quando si utilizza il bastone su tappeti, superfici bagnate, superfici scivolose (foglie, ghiaia, sabbia o neve). Non superare mai il peso massimo supportato.</p> <p>Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone con gravi problemi di equilibrio o disturbi percettivi funzionali. Se non regolato all'altezza corretta, l'uso del dispositivo potrebbe causare danni derivati dalla postura scorretta (lesioni e contratture muscolari alla schiena, alle braccia e alle mani).</p>	

**Smaltimento:** Smaltire secondo le normative vigenti.

Cod. ISO (LEA 2017): 12.03.06.003



Codice	Barcode
990759553	 A990759553

