

# Rialzo WC con bidet con o senza coperchio

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Destinazione d'uso:** Dispositivo destinato a persone che hanno difficoltà nel sedersi o alzarsi usando il WC. Il Dispositivo è destinato anche per chi ha difficoltà a svolgere in autonomia la propria igiene intima, in quanto completo di un bidet portatile.



**Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe I.

**Caratteristiche:**

- Veloce e facile da montare, si adatta alla maggioranza dei wc.
- La seduta del Rialzo WC incorpora aperture sia anteriori che posteriori, permettendo una maggiore accessibilità per l'igiene personale.
- Dotato di leggera inclinazione negativa che aiuta un corretto posizionamento posturale e riduce la flessione dell'anca e dell'articolazione del ginocchio.
- **Portata massima 250 Kg**
- Dimensioni esterne: 40,5x36,5 cm
- Apertura (sia anteriore che posteriore) 26x21 cm
- Altezze disponibili: cm 10 o 14 (secondo il modello)
- Meccanismo di ancoraggio laterale composto da due staffe in plastica regolabili in larghezza.
- Disponibile nella versione con e senza coperchio.
- Bidet portatile e sagomato in dotazione in modo da poter essere installato facilmente nel rialzo wc. Nella parte anteriore una superficie rugosa permette di appoggiare una saponetta.




**Composizione:** Polipropilene e Poliammide.

**Pulizia e manutenzione:** Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro / detergente non aggressivo.

Il Rialzo WC può essere immerso totalmente nell'acqua. Asciugare con un panno asciutto e pulito. Per garantire un utilizzo sicuro e un adeguato standard di igiene, eseguire la procedura prima di ogni utilizzo. Accertarsi sempre dell'integrità strutturale del dispositivo e dei suoi componenti.

**Avvertenze:** Usare il Dispositivo solo se integro e non presenta danneggiamenti o crepe. Seguire le istruzioni per l'uso per il corretto montaggio. Prima dell'utilizzo assicurarsi che il Dispositivo sia fissato correttamente al WC. Non superare la portata massima di 250 KG. Non serrare eccessivamente il sistema di bloccaggio. Durante l'uso del Dispositivo mantenere una posizione di equilibrio, evitando di sporgersi in avanti.

**Smaltimento:** Smaltire il Dispositivo secondo le normative vigenti.

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	CND	RDM
902666864	 A902666864	CON COPERCHIO - h. 10 cm	Y091215	2343708
902666977	 A902666977	SENZA COPERCHIO - h. 10 cm	Y091215	2343721
930547676	 A930547676	CON COPERCHIO - h. 14 cm	Y091215	2343728
930549199	 A930549199	SENZA COPERCHIO - h. 14 cm	Y091215	2343731

