
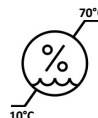


Cerotto di Fissaggio per Catetere

10 pz

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

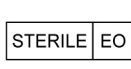

Classificazione: Dispositivo Medico Classe IIa.

Destinazione d'uso: Il cerotto di fissaggio viene utilizzato per vari trattamenti della ferita, come l'assorbimento dell'essudato, la pulizia o il fissaggio di cateteri.

Caratteristiche:

- Dispositivo monouso.
- Ogni cerotto è confezionato singolarmente in busta sterile.
- Confezione da 10 pz.
- Validità 3 anni.



Composizione: Tessuto non tessuto accoppiato a pellicola di poliuretano medicale. Adesivo medicale acrilico sensibile alla pressione. Sistema di fissaggio a strappo in nylon. Liner protettivo in carta glassine.

Modalità d'uso: Prima di utilizzare il dispositivo pulire e disinfettare la ferita. Aprire la confezione, rimuovere lo strato protettivo su entrambe le estremità della parte posteriore, far aderire la superficie adesiva alla cute e quindi fissare il catetere al cerotto di fissaggio tramite l'apposito loop.

Conservazione: Conservare in luogo fresco, asciutto, privo di polvere, al riparo dalla luce solare diretta.

Avvertenze e precauzioni:

- Il dispositivo può essere utilizzato solo da un operatore sanitario o sotto la sua supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di allergie pregresse ai materiali di composizione.
- Non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza indicata sull'etichetta.
- Non utilizzare se la busta primaria non è integra.
- Disinfettare la ferita prima dell'uso e non toccare il cuscinetto protettivo con le mani dopo aver aperto la confezione.
- Cambiare il dispositivo regolarmente per mantenere la ferita pulita.
- In caso di irritazione della pelle, interrompere l'uso.

Smaltimento: smaltire secondo le normative vigenti.

CODICE	BARCODE	CND	RDM
990549267	 A990549267	M04010101 MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE	3027489

