

Deflussore Flebo S/Ago con Roller e Punto di Infusione a "Y"

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico Classe IIa.

Destinazione d'uso: Dispositivo monouso sterile indicato per infusione di soluzioni infusionali ad alta precisione a caduta.

Caratteristiche:

- Deflussore per soluzioni perfusionali a caduta a due vie.
- Dotato di perforatore con cappuccio di protezione.
- Presa d'aria antibatterica.
- Camera di gocciolamento macrogoccia standard con filtro.
- Tubo flessibile trasparente con raccordo a "Y" permette di osservare il passaggio della soluzione e di verificare l'eventuale presenza di bolle d'aria.
- Raccordo a "Y" con punto d'iniezione autosigillante, perforabile con un ago ipodermico.
- Regolatore di flusso "Roller Clamp" permette di bloccare completamente il flusso e può essere utilizzato più volte durante un'infusione senza danneggiare il tubo.
- Raccordo Luer Lock con tappino di chiusura.
- Apirogeno, atossico.
- Non contiene lattice, né ftalati.
- Sterilizzato a Ossido di etilene.
- Validità 3 anni dalla data di produzione.
- Confezionato singolarmente in sacchetto sterile con apertura "peel".



Dimensioni: Lunghezza totale 165 cm / Tubo: lunghezza 150 cm, Ø est. circa 4 mm, Ø int. circa 3 mm.

Camera di gocciolamento: standard (20 gocce H₂O = 1 ml ± 0,1 ml), lunghezza circa 62 mm, capacità circa 6,5 ml.

Materiali: PVC, ABS, Isoprene, Polietilene, Polipropilene.

Avvertenze e precauzioni: Gettare dopo l'uso, la sterilità è garantita a confezione integra e sigillata, da utilizzare entro la data di scadenza, utilizzo riservato al personale medico o personale qualificato. Non utilizzare con pompe infusionali o a pressione, non utilizzare con farmaci fotosensibili, utilizzare solo con farmaci compatibili con PVC.

Stoccaggio: Stoccare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura consigliata di +5 / +35°C. Evitare l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o a fonti luminose/fluorescenti.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti in materia di taglienti/pungenti e materiali infetti.

Codice	Descrizione	Barcode	CND	RDM
904553082	DEFLUSSORE FLEBO S/AGO CON ROLLER E PUNTO DI INFUSIONE A "Y"	 A904553082	A03010101 DEFLUSSORI CON E SENZA PRESA D'ARIA	1766079/R

