

Deflussore Flebo con Regolatore di Flusso

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivo Medico Classe IIa.**Destinazione d'uso:** Dispositivo monouso sterile indicato per somministrazione di soluzioni infusionali.**Caratteristiche:**

- Materiali chimicamente stabili, trasparenti, flessibili, resistenti alla trazione e alla pressione interna del circuito del fluido.
- Perforatore con cappuccio di protezione.
- Presa d'aria antibatterica.
- Camera di gocciolamento con filtro soluzione 15 micron.
- Stringitubo a roller.
- Microregolatore di flusso / orario con doppia scala.
- Punto di iniezione ad "Y" latex free con paradito, ripetutamente perforabile (almeno 20 volte con ago da 0,8 mm).
- Raccordo Luer Lock con tappino di chiusura.
- Apirogeno, atossico.
- Non contiene lattice, né ftalati.
- Sterilizzato a Ossido di etilene.
- Validità 5 anni dalla data di produzione, se conservato correttamente, a confezione integra.
- Confezionato singolarmente in busta sterile in accoppiato di carta medica e polietilene.

Dimensioni: Tubo in PVC: lunghezza 190 cm (30+130+30), Ø 3 x 4,1 mm.

Camera di gocciolamento: 20 gocce = 1 ml.

Materiali:

- PVC, ABS, Polietilene, Nylon, Poliisoprene.
- Sono atossici gli inchiostri utilizzati per evidenziare gli indici di misura o di lettura impressi sulle parti a diretto contatto con il prodotto.
- I materiali utilizzati sono compatibili nei confronti dei prodotti farmaceutici con cui possono venire a contatto nella normale pratica d'uso.
- I materiali utilizzati in riferimento all'eventuale cessione di sostanze nelle soluzioni somministrate sono conformi a quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale.
- Non plastificati con ftalati (DEHP-FREE).



Deflussore Flebo con Regolatore di Flusso

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Regolatore di flusso:

Il dispositivo è un regolatore di flusso a gravità costituito da un esclusivo sistema che permette la predeterminazione del flusso che si vuole infondere. La scala numerica graduata permette la regolazione per i seguenti flussi in ml/h:

- soluzioni con viscosità inferiore o pari a quella di soluzioni di glucosio al 10 %:
5 - 10 - 20 - 30 - 42 - 50 - 62 - 75 - 83 - 104 - 125 - 150 - 167 - 200 - 210 - 250 open / aperto
- soluzioni con viscosità pari a quella di soluzioni di glucosio al 40%:
5 - 10 - 20 - 42 - 62 - 83 - 104 - 125 - 167 - 200 open / aperto.



Avvertenze:

- Il dispositivo non deve essere usato per somministrare plasma e suoi derivati.
- Particolare attenzione deve essere prestata quando si somministrano soluzioni ad alta densità.
- La velocità del flusso erogato con i dispositivi di regolazione a gravità è influenzata da diversi fattori tra i quali: la pressione venosa del paziente.
- La quantità di liquido infusa può essere limitata dalle dimensioni dell'ago o del catetere utilizzato.
- Pressione massima 0,5 bar (7 psi).
- Tolleranza del flusso: 5-20 ml/h 30%; 20-40 ml/h 20%; 40-250 ml/h 15%.
- Stabilità del flusso: variazione massima 5% in 24h (testata con soluzione NaCl 0,9% in flacone di vetro).
- Dispositivo monouso, non risterilizzabile.
- La sterilità è garantita a confezione integra e sigillata.
- Da utilizzare entro la data di scadenza.
- Utilizzo riservato al personale medico o personale qualificato.

Stoccaggio: Stoccare nell'imballo originale, in luogo pulito ed asciutto (umidità 40% - 65%), a temperatura ambiente di +5 / +30°C, lontano da fonti di calore.

Smaltimento: smaltire secondo le normative vigenti in materia di rifiuti ospedalieri.

Codice	Descrizione	Barcode	CND	RDM
924852066	DEFLUSSORE CON REGOLATORE DI FLUSSO	 A924852066	A03010103 DEFLUSSORI CON REGOLATORE DI FLUSSO	201285/R

