

Fonendoscopio e Stetofonendoscopio

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I.

Fonendoscopio tipo leggero, piatto, con membrana.
Archetto biauricolare per auscultazione con molla esterna.

Composizione e caratteristiche: Il FONENDOSCOPIO

è composto da:

- una testina piatta in alluminio leggero
- diametro membrana 47 mm
- un archetto biauricolare con in dotazione due olive in PVC
- un tubo a "Y" in PVC



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I.

Composizione e caratteristiche:

STETOFONENDOSCOPIO LEGGERO, girevole, con membrana ed anellino gomma nello stetoscopio.
Doppia testina: una testina piatta ed una testina a campana, di forma conica.

Archetto biauricolare per auscultazione con molla esterna.

Lo **STETOFONENDOSCOPIO** è composto da:

- una doppia testina commutabile (con un lato piatto ed un lato a campana) in alluminio leggero
- diametro membrana 47 mm
- un archetto biauricolare con in dotazione due olive in PVC
- un tubo a "Y" in PVC



CODICE	BARCODE	Modello
909071401	 A909071401	Fonendoscopio
909071413	 A909071413	Stetofonendoscopio

Ricambi:

- **Cod. 901069385** - Tubo a Y nero per fonendo/stetofonendo.
- **Cod. 900726530** - Testina per fonendo.
- **Cod. 900214141** - Oliva per fonendo e stetofonendo conf. 6 pz.



Fonendoscopio e Stetofonendoscopio

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Indicazioni d'uso:**

Per l'auscultazione cardio-polmonare.

Istruzioni d'uso fonendoscopio:

Posizionare correttamente l'archetto biauricolare ed appoggiare la testina sulla parte del corpo interessata.

Se usato per la misurazione della pressione arteriosa, inserire la testina del dispositivo tra il bracciale dello sfigmomanometro e la cute, posizionandola con la membrana rivolta verso la cute stessa ed in corrispondenza del percorso dell'arteria brachiale. Auscultare i toni dell'arteria identificando i valori della pressione sistolica e diastolica sulla scala graduata dello sfigmomanometro.

Istruzioni d'uso stetofonendoscopio:

Posizionare correttamente l'archetto biauricolare ed appoggiare la testina sulla parte del corpo interessata, scegliendone il lato opportuno.

Per commutare la testina, tenere con una mano il tubo a "Y" in corrispondenza della connessione con la testina stessa e ruotare con l'altra mano la testina di 180° finché non si sente un CLICK.

Manutenzione, precauzioni d'utilizzo, conservazione e manipolazione del dispositivo:

- Controllare la perfetta integrità del tubo in PVC a Y e lo stato di usura e pulizia delle olive prima di ogni utilizzo.
- Non usare mai senza le olive.
- Prima dell'uso, assicurarsi che l'archetto sia regolato in modo ergonomico. In caso contrario, diminuire o aumentare la tensione stringendo o allargando delicatamente i tubi dell'archetto.
- Quando non utilizzato, non riporre con il tubo in PVC a Y eccessivamente piegato o "strozzato".
- Per la pulizia usare un panno morbido con acqua saponata. Non usare alcool, benzine o solventi.
- Non utilizzare su pelle lesa.
- Non immergere in liquidi.
- Non esporre a fonti di calore o a temperature elevate.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Modalità di smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

