

Valvola per Catetere

5pz

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivo Medico Classe Is.**Destinazione d'uso:**

La valvola per catetere è un dispositivo medico destinato all'utilizzo in combinazione con un catetere uretrale permanente o un catetere sovrapubico, per consentire lo svuotamento della vescica. Il suo uso è idoneo sia per uomini che per donne. Rappresenta un'alternativa discreta alle sacche di raccolta delle urine che, a differenza delle sacche, permette di svuotare la vescica a intervalli regolari, preservando la normale funzione vescicale.

Caratteristiche:

- Dotata di una leva di sicurezza per evitare un'apertura accidentale.
- Collegamento universale graduato compatibile con tutti i materiali per cateteri.
- Dispositivo monouso.
- Ogni valvola è confezionata singolarmente in busta sterile.
- Confezione da 5 pz.
- Validità 5 anni.

Composizione: PE, ABS, silicone.

Modalità d'uso: È importante utilizzare la valvola secondo le indicazioni fornite dal personale sanitario, rispettando la frequenza raccomandata. Lavare e asciugare le mani. Mantenendo la valvola sopra il WC o un contenitore appropriato, spingere la leva verso il basso per aprire la valvola. Svuotare completamente la vescica mediante la valvola. Quando l'urina non fluisce più, tirare la leva completamente verso l'alto per chiudere la valvola. Se necessario, pulire l'estremità della valvola con un panno asciutto. Lavare e asciugare le mani. Cambiare la valvola ogni 7 giorni, o prima se risulta danneggiata o sporca. Se si utilizza una sacca di raccolta durante la notte, quest'ultima può essere collegata al tubo di drenaggio morbido in silicone presente all'estremità della valvola per catetere; per permettere all'urina di continuare a defluire, la leva della valvola deve essere nella posizione aperta.

Avvertenze e precauzioni:

- Il dispositivo può essere utilizzato solo se prescritto dal Medico.
- Utilizzare il dispositivo solo se si è in grado di azionarlo regolarmente e di ricordarsene.
- La valvola viene fornita sterile, deve essere collegata una sola volta e in seguito eliminata. Non è consentito risterilizzarla o riutilizzarla.
- Non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza indicata sull'etichetta.
- Non utilizzare se la confezione primaria non è integra, in quanto non è garantita la sterilità.

Controindicazioni: La valvola per catetere non è idonea per:

- ⇒ persone non in grado di azionare la valvola;
- ⇒ persone non in grado di ricordarsi di azionare la valvola;
- ⇒ persone con capacità vescicale ridotta;
- ⇒ persone con ridotta sensibilità al riempimento vescicale;
- ⇒ persone con insufficienza renale o reflusso vescico-uretrale;
- ⇒ persone con vescica iperattiva incontrollata.

Conservazione: Conservare in luogo fresco, asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.**Smaltimento:** smaltire secondo le normative vigenti.Scopri il nostro supporto di lavoro: www.farmacare.it/trattamenti

CODICE	BARCODE	CND	RDM
990549305	 A990549305	A0703 RUBINETTI	3027510

