

SAFE LIFE

Cuscino antidecubito in Memory Foam

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I.

Destinazione d'uso: Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito nei pazienti lungodegenti che utilizzano sedute come sedie da comodo, carrozzine e poltrone. Garantisce un'efficace distribuzione del carico corporeo e contribuisce ad alleviare la pressione sulle prominenze ossee.

Caratteristiche:

- Dimensioni: 42 x 42 x 5 cm ($\pm 3\%$).
- Cuscino realizzato in materiale automodellante speciale (Memory Foam): 100% polimero poliuretanico.
- Fodera amovibile e lavabile con chiusura a zip: Lato superiore: 100% poliestere, impermeabile; Lato inferiore: 100% poliestere, con puntini antiscivolo in silicone/PVC.

Pulizia e manutenzione: La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura della fodera. Lavare la fodera in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente. Eliminare l'eccesso d'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare. Non asciugare il capo in asciugatrice. Asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare. Non lavare a secco. Non candeggiare. Evitare l'uso di materiali abrasivi per eliminare eventuali macchie.

Conservazione: Conservare al riparo da luce solare diretta, fonti di calore e umidità. Per una conservazione ottimale, riporre nell'imballo originale quando non in uso. Conservare il cuscino in posizione orizzontale. Il mantenimento dell'integrità fisica del dispositivo (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la sua durata di vita.

Avvertenze e precauzioni:

Consultare il Medico curante prima di utilizzare il dispositivo.
Non utilizzare in caso di allergia nota ai materiali di composizione.
Evitare il contatto diretto con la cute dell'utilizzatore.
Non usare a contatto con cute lesa. In caso di reazioni cutanee avverse, interrompere l'uso del dispositivo e consultare un medico.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Tenere lontano da fiamme libere, fonti di calore, materiali infiammabili e oggetti taglienti o appuntiti.
Evitare il contatto con utensili o qualsiasi elemento che possa perforare il dispositivo e causare danni permanenti al prodotto.

Smaltimento: smaltire secondo le normative vigenti.



CODICE MINSAN	DESCRIZIONE	BARCODE	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)	RDM
990549279	SAFE LIFE cuscino antidecubito/memory foam	 A990549279	V08030102 Cuscini medicali antidecubito non attivi	3012531

