


BENDE ALLA COLLA DI ZINCO FARMAZINK

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

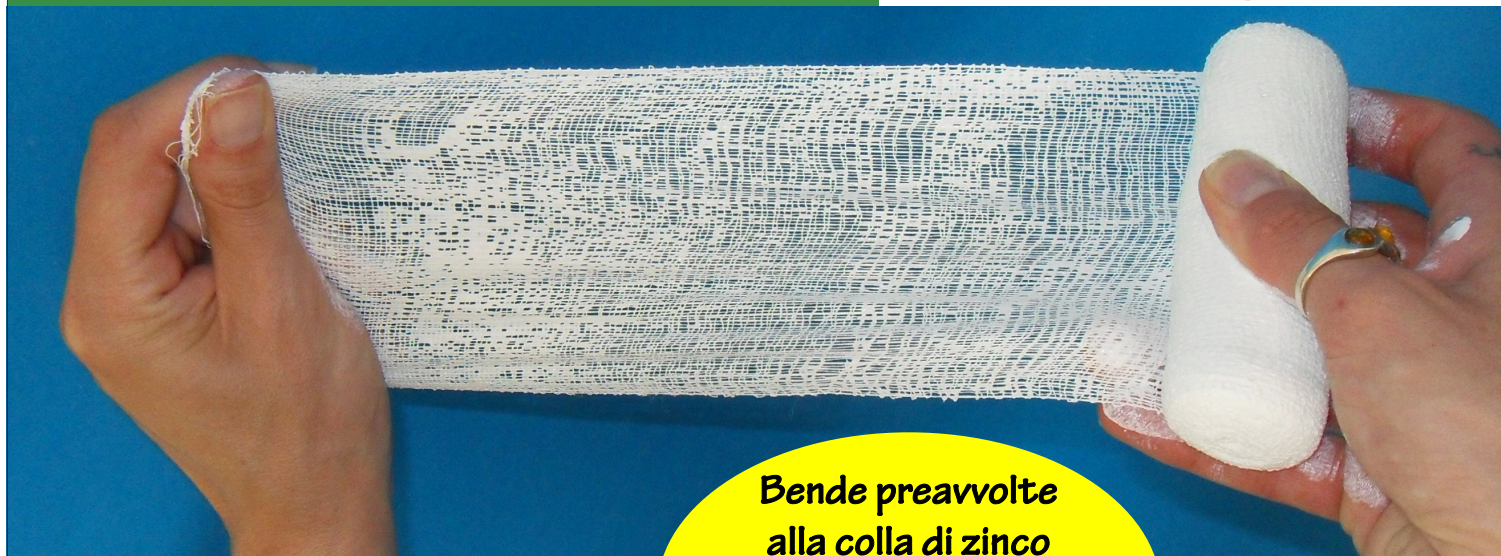

**Bende preavvolte
alla colla di zinco
disponibili in versione
rigida o elastica
in diverse misure.**

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso:

Bendaggio destinato ad alleviare il dolore muscolare. In particolare è indicato nei casi di strappi muscolari, contusioni, distorsioni, gonfiore post-traumatico e traumi sportivi.

Composizione:

Benda base: Viscosa e Poliammide – Pasta di zinco: Acqua, glicerina, ossido di zinco, carbossimetilcellulosa, gelatina e conservanti.

BARCODE	CODICE MINSAN	DESCRIZIONE
 A930244874	930244874	Benda elastica alla colla di zinco Farmazink cm.10x5mt. – 1pz.
 A930244898	930244898	Benda elastica alla colla di zinco Farmazink cm.10x10mt. – 1pz
 A930244900	930244900	Benda rigida alla colla di zinco Farmazink cm.10x5mt. – 1pz.
 A930244912	930244912	Benda rigida alla colla di zinco Farmazink cm.10x10mt. – 1pz



BENDE ALLA COLLA DI ZINCO FARMAZINK

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Istruzioni per l'uso:

Pulire accuratamente la pelle prima di procedere al bendaggio.

Avvolgere la benda intorno all'arto procedendo a spirale dalla parte bassa fino alla parte alta coinvolta, facendo attenzione che la pressione venga esercitata in modo regolare ed uniforme.

Tagliare la benda e riarrotolare la parte rimanente per una successiva applicazione.

E' possibile coprire il bendaggio con un'ulteriore benda di garza elastica o tubolare per evitare di sporcare i vestiti (tipo il nostro Farmagrip).

Il paziente può camminare non appena viene effettuato il bendaggio.

Il movimento è consigliato per favorire l'efficacia terapeutica della benda attraverso il lavoro muscolare e per favorire la circolazione.

Avvertenze:

Non utilizzare in nessun caso quando si presenta allergia allo zinco o ipersensibilità a uno degli ingredienti della benda.

Non utilizzare su ferite aperte; in caso di ferite, coprirle con medicazioni sterili.

Non stringere troppo la fasciatura. In caso di dolori togliere immediatamente la benda.

Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o dopo la data di scadenza.

Utilizzare acqua tiepida in caso di difficoltà nella rimozione della benda.

Consultare il Medico prima dell'utilizzo per sapere i tempi di sostituzione della benda e la durata dell'applicazione. Solitamente il primo bendaggio viene cambiato dopo 2-4 giorni dall'applicazione.

Il prodotto è monouso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare al riparo da fonti di calore.

Controindicazioni:

Se il bendaggio non è applicato correttamente si possono presentare problemi circolatori.

Consultare il proprio Medico curante prima dell'uso e seguire attentamente le istruzioni.

Smaltimento:

Smaltire secondo la normativa vigente.

