

Cinto Erniario

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**CLASSIFICAZIONE: DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I****DESTINAZIONE D'USO:**

il dispositivo è destinato alla contenzione dell'ernia semplice inguinale monolaterale o bilaterale.

La contenzione è effettuata dalla pelotta inguinale.

I Dispositivi non hanno scopo terapeutico ma solo preventivo in quanto contribuiscono a ridurre la fuoriuscita ulteriore di un'ernia già esistente in particolare in situazioni in cui l'ernia è sottoposta ad ulteriore sforzo (lavoro, sport, ecc.).

COMPOSIZIONE:

Colore: ecrù;

Composizione cintura: Cotone 75% - Gomma 25%;

Rivestimento pelotta: Poliestere 88% - Elastam 12%

I° strato: film PU 100% - II° strato: MTP accoppiato, piastra velcro in polipropilene termosaldato intorno alla pelotta.

Pelotta: Gomma naturale con presenza di lattice; Fibbia e ganci metallici.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Prima di indossare il cinto si consiglia una accurata pulizia della cute;
2. Regolare la circonferenza della cintura e del sotto coscia tramite la fibbia ed i ganci metallici;
3. In posizione distesa, posizionare la pelotta sulla parte interessata riducendo in tal modo l'ernia nella propria sede.

PULIZIA: Lavare a mano con detersivo per capi delicati e acqua tiepida (massimo 30 °C). Non lavare a secco. Non usare candeggina. Non strizzare. Non asciugare in asciugatrice. Asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.

AVVERTENZE: Contiene lattice. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con oggetti incandescenti e taglienti.

CONTROINDICAZIONI: Se indicate dal Medico. In caso di insorgenza o persistenza di dolore, si consiglia di consultare il proprio Medico.

SMALTIMENTO: Smaltire secondo le norme vigenti.

**Cinto Erniario Singolo
(Dx/Sx)**



Cinto Erniario Doppio



Cinto Erniario

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Scelta della taglia del Cinto erniario doppio:

CIRCONFERENZA VITA	COD. CINTO DOPPIO	REF	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)	REP (Numero di Repertorio)
80 cm.	909818419	 A909818419	Y060406	2187666
85 cm.	909818508	 A909818508	Y060406	2187671
90 cm.	909818597	 A909818597	Y060406	2187722
95 cm.	909818686	 A909818686	Y060406	2187725
100 cm.	909818775	 A909818775	Y060406	2187727
105 cm.	909818864	 A909818864	Y060406	2187730
110 cm.	909818953	 A909818953	Y060406	2187762

Scelta della taglia del Cinto erniario destro (DX) e sinistro (SX):

CIRC.	COD. CINTO DX	REP (Numero di Repertorio)	COD. CINTO SX	REP (Numero di Repertorio)	REF	REF	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)
80 cm.	909819841	2187769	909817785	2187822	 A909819841	 A909817785	Y060406
85 cm.	909817241	2187787	909817874	2187829	 A909817241	 A909817874	Y060406
90 cm.	909817330	2187789	909817963	2187832	 A909817330	 A909817963	Y060406
95 cm.	909817429	2187800	909818054	2187835	 A909817429	 A909818054	Y060406
100 cm.	909817518	2187812	909818142	2187838	 A909817518	 A909818142	Y060406
105 cm.	909817607	2187814	909818231	2187847	 A909817607	 A909818231	Y060406
110 cm.	909817696	2187817	909818320	2187852	 A909817696	 A909818320	Y060406