

Contenitore e Provetta Urina sottovuoto



Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

sistema Trasfer

DESCRIZIONE E ISTRUZIONI D'USO: Il sistema Transfer è composto da uno speciale contenitore urina ed una provetta urina sottovuoto. Il sistema è progettato per gestire, in maniera più sicura ed igienica, il campionamento delle urine sia nelle strutture sanitarie che domestiche. Per l'utilizzo del sistema è necessario svitare il tappo del contenitore e raccogliervi l'urina secondo quanto prescritto dal Medico. Richiudere il contenitore con il tappo a vite. Per prelevare l'urina per il Laboratorio (operazione che può effettuare il paziente a casa propria e sia il Laboratorio) sarà sufficiente sollevare l'etichetta protettiva cartacea, posta sul tappo del contenitore, ed inserire la provetta senza togliere il tappo, nell'apposito foro presente nel tappo del contenitore: l'urina defluirà automaticamente (per effetto del vuoto) dal contenitore alla provetta senza il rischio di perdite e contaminazione dell'ambiente e dell'utilizzatore. La provetta così riempita è pronta per il Laboratorio analisi.



CONTENITORE URINA PER PROVETTE SOTTOVUOTO

Classificazione: IVD (Diagnostico in vitro)
Per campionamento urine.

COMPOSIZIONE

CORPO DEL CONTENITORE: Materiale: Polipropilene colore neutro / trasparente.

TAPPO: Materiale: Polietilene colore giallo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità 120 ml.
- Coperchio a vite di colore giallo con sistema Transfer per provette sottovuoto
- Ø inferiore 47.9 mm.
- Ø superiore 56 mm.
- Altezza senza tappo 71.5 mm.
- Altezza con tappo 71.8 mm.
- Graduazione da 10 ml a 100 ml (a intervalli di 10 ml).
- Dotato di sistema di aspirazione per provetta sottovuoto.
- Area scrivibile per dati paziente (nome, N°, data).
- Monouso.
- Sterile (metodo di sterilizzazione a irradiazione).
- Privo di lattice.

1 PEZZO



PROVETTA URINA PER CONTENITORE SOTTOVUOTO

Classificazione: IVD (Diagnostico in vitro)
Per campionamento urine e trasporto al laboratorio.

COMPOSIZIONE

CORPO DELLA PROVETTA: Materiale: Polipropilene colore neutro / trasparente.

TAPPO: Materiale: Polietilene colore giallo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità 9 ml.
- Forma cilindrica.
- Ø superiore 16 mm.
- Altezza senza tappo 100 mm.
- Altezza con tappo 105 mm.
- Etichetta cartacea applicata per scrittura dati (nome, data, ecc).
- Monouso.
- Sterile (metodo sterilizzazione a irradiazione).
- Priva di lattice.

1 PEZZO



CONFEZIONE PRIMARIA - Entrambi confezionati singolarmente in busta saldata contenuta in astuccio. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO PER ENTRAMBI I DISPOSITIVI.

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. Dopo l'uso smaltire secondo le normative vigenti in materia di materiali a rischio biologico.

