

Linea COPRISTOMA

Bavaglini - Collaretti - Foulard

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

BAVAGLINI COPRISTOMA

Utilizzati per coprire con eleganza la stomia.

Istruzioni per l'uso: lavare il copristoma prima e dopo l'utilizzo. Bavaglino copristoma dotato di due fascette in velcro da cucire a seconda delle esigenze individuali. Indossare il bavaglino attorno al collo e chiuderlo.

Istruzioni di lavaggio: lavare a mano a 30 °C con sapone neutro. Non lavare a secco, non candeggiare, non strizzare, non asciugare alla luce diretta del sole, non stirare.

Controindicazioni: nessuna se non segnalate espressamente dal Medico curante.
E' consigliabile non superare i 10 lavaggi.

Conservazione: conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Componenti: cotone rasato mercerizzato 100% - frammento in velcro fornito in dotazione poliammide 100% - protezione poliestere 100%.

Smaltimento : smaltire secondo la legislazione vigente.



CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE
982535510	BAVAGLINO COPRISTOMA - AZZURRO -	 A982535510
982535484	BAVAGLINO COPRISTOMA - BIANCO -	 A982535484



Novità!

Gel lubrificante in siringa cod. 971931264
può essere utilizzato per facilitare l'inserimento
di tubi e cannule endotracheali.



Linea COPRISTOMA

Bavaglini - Collaretti - Foulard

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



COLLARETTO COPRISTOMA

Poliestere 100% - 6 strati

Utilizzati per coprire con eleganza la stomia.

Istruzioni per l'uso: lavare il copristoma prima e dopo l'utilizzo. Collaretti copristoma dotati di due fascette in velcro da cucire a seconda delle esigenze individuali. Indossare il collaretti attorno al collo e chiuderlo.

Istruzioni di lavaggio: lavare a mano a 30 °C con sapone neutro. Non lavare a secco, non candeggiare, non strizzare, non asciugare alla luce diretta del sole, non stirare.

Controindicazioni: nessuna se non segnalate espressamente dal Medico curante.
E' consigliabile non superare i 10 lavaggi.

Conservazione: conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Componenti: poliestere 100% - bottoni automatici in metallo in dotazione.

Smaltimento : smaltire secondo la legislazione vigente.

CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE
982535561	COLLARETTO POLIESTERE 100% COLORE BIANCO	 A982535561



Linea COPRISTOMA

Bavaglini - Collaretti - Foulard

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



FOULARD CON PROTEZIONE

Utilizzati per coprire con eleganza la stomia.

Istruzioni per l'uso: lavare il copristoma prima e dopo l'utilizzo. Indossare attorno al collo e regolare la chiusura.

Istruzioni di lavaggio: lavare a mano a 30 °C con sapone neutro. Non lavare a secco, non candeggiare, non strizzare, non asciugare alla luce diretta del sole, non stirare.


Controindicazioni: nessuna se non segnalate espressamente dal Medico curante.
E' consigliabile non superare i 10 lavaggi.

Conservazione: conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Componenti: viscosa 100% - poliestere 100% (protezione).

Smaltimento : smaltire secondo la legislazione vigente.

CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE
982535585	FOULARD COPRISTOMA COLORE BLU	 A982535585

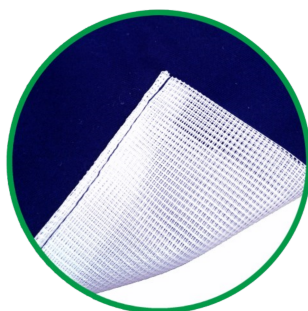

ANCHE CON
PROTEZIONE
INTERNA

