

# Plantare 3/4 in Silicone con Cuscinetto

## 1 Paio

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Dispositivo Medico di Classe I

### Destinazione d'uso

Quando consigliati dallo Specialista sono indicati per fornire stabilità posturale garantendo una superficie di appoggio più ampia, evitando un sovraccarico di pressione sulla fascia plantare. Lo scarico pressorio offerto dal plantare dona sollievo e benessere al piede. Modello standard adatto a persone di peso medio. **Il dispositivo non è un plantare correttivo ma funge da ammortizzatore.**

Ideali per prevenire: microtraumi e/o patologie da sovraccarico, per trattare postumi di fratture e microfratture, per la prevenzione del "piede diabetico".

### Caratteristiche

Il materiale ha ottime capacità di assorbire urti e vibrazioni derivanti da importanti impatti meccanici a livello della fascia plantare, proteggendola da potenziali traumi. La flessibilità del materiale non altera la deambulazione.

Indicati per chi soffre di Talloniti • Tendiniti • Spina calcaneare • Fascite.

I plantari sono realizzati con silicone di durezza modulata:

- I due inserti azzurri (uno in posizione calcaneare e uno posizione metatarsale) più morbidi (SHORE A 10 +/- 3), per offrire maggiore aderenza nelle zone più esposte ai picchi di pressione.

- Le parti del plantare in silicone trasparente sono realizzate in silicone più duro (SHORE 00 28+/-4) per offrire maggiore stabilità all'utilizzatore.

Realizzati in silicone atossico tramite processo di catalizzazione su base platino – Si adattano a qualsiasi tipo di calzatura, preferibilmente con stringhe – Ottima stabilità del piede – Non assorbono odori. Facilmente lavabili – Elastici e resistenti.

**Istruzioni per l'uso:** Scegliere la misura corrispondente al proprio piede ed inserire i plantari all'interno delle calzature. Per migliorare la calzatura e il confort, cospargere con un leggero strato di talco. Utilizzare un calzino per evitare il contatto diretto con il plantare e migliorare la traspirazione del piede.

**Pulizia e manutenzione:** Lavare a mano con acqua e sapone neutro: asciugare all'aria. Evitare il contatto con acidi, pomate o grassi. Tenere lontano da fonti di calore, polvere e oggetti incandescenti. Evitare il contatto con oggetti appuntiti e taglienti.

**Avvertenze e controindicazioni:** Non utilizzare a contatto con cute lesa o ferite aperte o in caso di irritazioni cutanee in atto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se il prodotto risulta danneggiato non utilizzarlo. Non utilizzare in caso di intolleranza al silicone. In caso di insorgenza di irritazioni o dolori, interrompere l'utilizzo e consultare il proprio Medico.

**Smaltimento:** assimilabile ai rifiuti solidi urbani, secondo la legislazione vigente.

**CND (Classificazione Nazionale Dispositivi): Y06120601**

Codice/Mis.	Barcode	REP (Numero di repertorio)
906635661 per piede 35-36	 A906635661	2284540
906635669 per piede 37-38	 A902288669	2284541
906635671 per piede 39-40	 A902288671	2284568

Codice/Mis.	Barcode	REP (Numero di repertorio)
906635685 per piede 41-42	 A906635685	2284542
906635697 per piede 43-44	 A906635697	2284569
906635711 per piede 45-46	 A906635711	2284577