

Set Accessori per Aerosolterapia

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe IIa;

Destinazione d'uso:

Il SET ACCESSORI PER AEROSOLTERAPIA, mediante la connessione ad un apparecchio per aerosolterapia, è destinato ad erogare, in forma nebulizzata, sostanze medicinali per via aerosolica.



Descrizione prodotto:

Il SET ACCESSORI PER AEROSOLTERAPIA è un nebulizzatore **riutilizzabile** ad alta efficienza compatibile **con la maggior parte dei compressori disponibili** sul mercato ed efficace con qualsiasi tipo di farmaco.

È veloce per effetto del "secondo effetto Venturi" che, grazie all'apertura laterale, convoglia dall'esterno aria aggiuntiva all'interno dell'ampolla, aumentando così l'attività di nebulizzazione e il conseguente flusso verso il paziente.

Il volume residuo è ridotto al minimo grazie al particolare materiale impiegato nelle pareti interne del nebulizzatore che lascia scivolare le particelle verso il basso per essere ri-nebulizzate.

Sono disponibili, a richiesta, i singoli accessori.

Caratteristiche:

- Flusso minimo: 4.0 l/min ± 10 %;
- Pressione operativa relativa: 68 kPa (0.68 bar) ± 10 %;
- Flusso massimo: 8.0 l/min ± 10 %;
- Pressione operativa relativa: 110 kPa (1.10 bar) ± 10 %;
- Massimo volume di riempimento: 8 ml;
- Minimo volume di riempimento: 2 ml;
- MMAD* (μm): 3.8 con flusso operativo 4 ml/min;
- GSD**: 2.66 con flusso operativo 4 ml/min;
- MMAD* (μm): 2.48 con flusso operativo 8 ml/min;
- GSD**: 2.85 con flusso operativo 8 ml/min;
- Connessione tubo aria: $\varnothing 5 \times 11$ (mm) - Lunghezza: 1 MT
- Composizione materiali a contatto con il paziente: LATEX FREE

Materiali:

POLIPROPILENE: ampolla per aerosolterapia - forcella per aerosolterapia - boccaglio per aerosolterapia

PVC: mascherina pediatrica e adulti per aerosolterapia – tubo aerosolterapia

* MMAD Median Mass Aerodynamic Diameter

** GSD Geometric Standard Deviation



Set Accessori per Aerosolterapia

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

AVVERTENZE:

- Il Dispositivo Medico deve essere utilizzato seguendo le indicazioni del proprio Medico;
- L'utilizzo del Dispositivo Medico richiede sempre la sorveglianza di un adulto con piene facoltà mentali;
- Utilizzare la forcella nasale solo se richiesto dal proprio Medico, in questo caso le biforcazioni NON vanno introdotte nel naso ma solo avvicinate il più possibile;
- Dispositivo Medico non è adatto per anestesia e ventilazione polmonare;
- Il Dispositivo Medico **deve essere utilizzato solo abbinato ad apparecchi per aerosolterapia conformi alle norme vigenti**;
- I materiali utilizzati per il contatto con i farmaci sono polimeri termoplastici ad elevata stabilità e resistenza chimica;

PULIZIA:

Non fare bollire il tubo aria e le mascherine (adulti e pediatriche) e non lavare in lavastoviglie. Seguire i metodi di pulizia indicati.

Prima di procedere con il processo di pulizia spegnere l'apparecchio di aerosolterapia e scollegare il cavo di rete dalla presa elettrica. Pulire tutti i componenti del set AD ECCEZIONE DEL TUBO ARIA di collegamento, secondo uno dei due metodi:

- * Metodo 1: pulire a fondo i componenti del set (ad esclusione del tubo aria), per 5 minuti, utilizzando acqua potabile calda (circa 40° C) e sapone neutro.
- * Metodo 2: pulire i componenti del set per aerosolterapia (ad esclusione del tubo aria) immergendoli in una soluzione con 60% di acqua potabile e il 40% di aceto bianco. Al termine risciacquare abbondantemente con acqua potabile calda (circa 40° C) e fare asciugare all'aria in luogo pulito.
- * Il tubo aria non richiede pulizia poiché non a contatto né con il farmaco, né con il paziente.

Ulteriori informazioni sulle modalità di pulizia e sterilizzazione sono presenti sul manuale d'uso che correde il SET.

SMALTIMENTO: smaltire secondo le normative vigenti.

Bar code	Descrizione prodotto
979262829  A979262829	SET ACCESSORI PER AEROSOLTERAPIA Al suo interno comprende: 1 ampolla - 1 forcella - 1 boccaglio - 1 maschera adulti 1 maschera pediatrica - 1 Tubo aria (di collegamento)

Ricambi disponibili su richiesta:

979262969	TUBO AEROSOL PVC PER AEROSOLTERAPIA
979262918	MASCHERINA PEDIATRICA PER AEROSOLTERAPIA
979262920	MASCHERINA ADULTI PER AEROSOLTERAPIA
979262957	FORCELLA PER AEROSOLTERAPIA
979262944	BOCCAGLIO PER AEROSOLTERAPIA
979262932	AMPOLLA PER AEROSOLTERAPIA

